

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO

Cobre Botas Descartável

SECÇÃO	Unisexo
ARTIGO	Cobre Botas Descartável
BREVE DESCRIÇÃO	Protege toda a área do pé e perna. Repelente a líquidos e impermeável. Não estéril. Com ou sem antiderrapante.

**DESTINATÁRIOS:**

Cobre Botas descartáveis destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde e afins.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO**COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA:**

- Tecido não Tecido - TNT

(100% PP impermeável + PE Membrane)

- Linhas de costura 100% PES com Certificação Oeko-tex

MASSA POR UNIDADES DE SUPERFÍCIE:

- 55 gr/m², segundo a Norma EN12127

COR

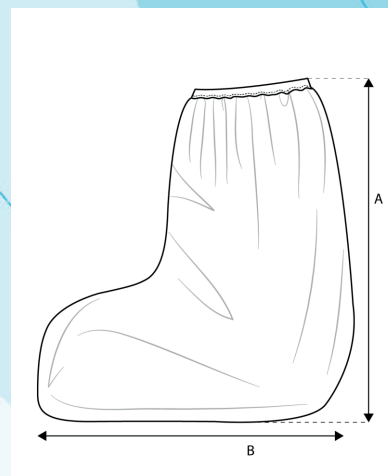
- Branca

Características	Norma / método
Livre de microorganismos	EN ISO 11737-1:2018
Resistência à penetração microbiana em Molhado	EN ISO 22610:2019
Resistência à penetração de líquidos	EN ISO 811:2018
Resistência ao rebentamento em Seco	EN ISO 13938-1:2019
Resistência ao rebentamento em Molhado	EN ISO 13938-1:2019
Resistência à tração em Seco	EN 29073-3:1992
Resistência à tração em Molhado	EN 29073-3:1992

ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS

Tabela de medidas

Parâmetros vs tamanhos [cm]		Mod 1	Mod 1	Tolerâncias
A	Altura	20	40	+/-1
B	Comprimento	38	38	+/-1

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- Higienizar das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar o cobre-botas.
- Colocar o cobre-botas com a face interna virada para o calçado e a face externa virada para fora.
- Ajustar o cobre-botas ao calçado, garantir o correto ajustamento.
- Após uso, remover o cobre-botas sem tocar nos membros inferiores, virando o cobre botas do avesso.
- Colocar o cobre-botas num contentor de resíduos hospitalares adequado.
- Efetuar nova higienização das mãos no final da utilização e manuseamento do cobre-botas.

Respeitar as instruções de conservação e limpeza indicadas, para manter a garantia de proteção do cobre-botas.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Guardar o cobre-botas num local fechado, seco e resguardar de potenciais focos de contaminação.

LIMITAÇÕES AO USO:

- O material é de utilização única.
- Não Reutilizável

* A Protect Others reserva-se ao direito de efectuar qualquer alteração à presente ficha técnica sem aviso prévio.